

Instruktioner för provtagning av MYDNA[®]_{VET} för fågel

Ditt testkit för blod innehåller:

- 1 provtagningsformulär
- 1 testkuvert och 1 blodark per fågel
- 1 svarskuvert

Renlighet och noggrannhet är A och O vid allt analysarbete. Därför är det viktigt att du läser igenom instruktionerna tills du förstår dem och sedan följer dem punkt för punkt för varje testad fågel. Tvätta händerna ordentligt innan provtagningen och välj en skyddad och avtorkad arbetsyta. Planera så att du om möjligt kan ta alla tester samtidigt. DNA-materialet ska du skicka tillbaka till oss så fort som möjligt. Om du tar testerna vid olika tidpunkter är det viktigt att de redan tagna proverna förvaras torrt, svalt och skyddat i våra DNA-testkuvert eller i ett rent papperskuvert, **aldrig** i plast.

Tänk på att allt DNA-material förstörs med tiden. DNA:s värsta fiender är fukt, mögel, solljus och värme. Förvara därför aldrig proverna i plast.

Observera: För att förhindra korskontaminering är det viktigt att inte vidröra cirkeln på blodarket där blodet ska placeras. Om du samlar in prov från fler än en fågel ska du desinficera klotången med alkohol och tvätta händerna ordentligt mellan varje provtagning.

Instruktioner steg för steg:

1. Fyll i samtliga uppgifter på provtagningsformulär och testkuvert.
2. Tvätta fågelns klo med hjälp av tex en bomullspinne.
3. Klipp fågelns klo enligt bilden nedan. Använd en desinficerad klotång och klipp klon precis intill venen.



4. **Placera blodarket** under den klippta klon för att absorbera upp blodet. Det är inte nödvändigt att helt fylla cirkeln på arket men se till att det finns synligt blod (oftast 1–3 droppar).
5. **Låt blodarket lufttorka** på en ren och torr yta i cirka 60–90 minuter. Undvik att vidröra blodområdet på blodarket.
6. **Lägg ner blodarket i testkuvertet** och klistra igen.

7. Upprepa steg 1–6 för samtliga fåglar som ska testas
8. **Lägg ner alla testkuvert samt provtagningsformuläret** i svarskuvertet och posta till oss.

Nästa steg.

Du kommer få ditt resultat som en PDF-fil skickad till den e-post som angavs vid beställningstillfället. Analystid för de olika DNA-testerna hittar ni på vår hemsida under respektive DNA-test.

Vid frågor besök vår hemsida www.mydnave.se eller kontakta oss på info@mydnave.se eller 040-69 22 450