

Instruktioner för provtagning av MYDNA[®]_{VET} för fågel

Ditt testkit för fjäder innehåller:

- 1 provtagningsformulär
- 1 testkuvert per fågel
- 1 svarskuvert

Renlighet och noggrannhet är A och O vid allt analysarbete. Därför är det viktigt att du läser igenom instruktionerna tills du förstår dem och sedan följer dem punkt för punkt för varje testad fågel. Tvätta händerna ordentligt innan provtagningen och välj en skyddad och avtorkad arbetsyta. Planera så att du om möjligt kan ta alla tester samtidigt.


DNA-materialet ska du skicka tillbaka till oss så fort som möjligt. Om du tar testerna vid olika tidpunkter är det viktigt att de redan tagna proverna förvaras torrt, svalt och skyddat i våra DNA-testkuvert eller i ett rent papperskuvert.

Tänk på att allt DNA-material förstörs med tiden. DNA:s värsta fiender är fukt, mögel, solljus och värme

Observera: För att förhindra korskontaminering är det viktigt att inte vidröra änden på fjädern där hårsäcken sitter. Om du samlar in prov från fler än en fågel ska du desinficera pincetten med alkohol och tvätta händerna ordentligt mellan varje provtagning.

Instruktioner steg för steg:

1. Fyll i samtliga uppgifter på provtagningsformulär och testkuvert.
2. **Plocka 5 bröstfjädrar** med en rengjord/sanerad pincett (8 st för små fåglar). Ta tag i fjädern så nära huden som möjligt för att undvika att fjädern bryts. Plocka en fjäder åt gången. De plockade fjädrarna måste ha kvar hårsäcken då det är här DNA:et sitter.

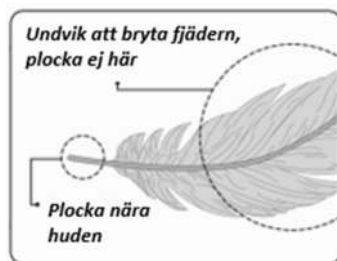

3. **Lägg ner fjädrarna i testkuvertet** och klistra igen.
4. **Upprepa steg 1–3** för samtliga fåglar som ska testas.
5. **Lägg ner alla testkuvert samt provtagningsformuläret** i svarskuvertet och posta till oss.

Nästa steg.

Du kommer få ditt resultat som en PDF-fil skickad till den e-post som angavs vid beställningstillfället. Analystid för de olika DNA-testerna hittar ni på vår hemsida under respektive DNA-test.

Vid frågor besök vår hemsida www.mydnavev.se eller kontakta oss på info@mydnavev.se eller 040-69 22 450