



Instruktioner för provtagning av MYDNA[®]_{VET} för hund

Ditt testkit innehåller:

- 1 provtagningsformulär
- 1 testkuvert med 4 provpinnar per hund (2 förpackningar med 2 provpinnar/förp.)
- 1 svarskuvert

Renlighet och noggrannhet är A och O vid allt analysarbete. Därför är det viktigt att du läser igenom instruktionerna tills du förstår dem och sedan följer dem punkt för punkt för varje testad hund. Tvätta händerna ordentligt innan provtagningen och välj en skyddad och avtorkad arbetsyta. Var noga med att inte röra vid toppen av provpinnarna. Planera så att du om möjligt kan ta alla tester samtidigt. Provpinnar med DNA-material ska du skicka tillbaka till oss så fort som möjligt. Om du tar testerna vid olika tidpunkter är det viktigt att de redan tagna provpinnarna förvaras torrt, svalt och skyddat i våra DNA-testkuvert eller i ett rent papperskuvert, **aldrig** i plast.

Tänk på att allt DNA-material förstörs med tiden. DNA:s värsta fiender är fukt, mögel, solljus och värme. Förvara därför aldrig proverna i plast.

Instruktioner steg för steg

OBSERVERA: Undvik att ge din hund mat eller godis två timmar före provtagningen.

1. **Fyll** i samtliga uppgifter på provtagningsformulär och testkuvert.
2. **Öppna försiktigt förpackningen** med provpinnarna och tag ut en provpinne i taget. **OBS!** Vidrör **aldrig** toppen av provpinnen.
3. **Gnid/rotera toppen av pinnen** i insidan av kinden under 10 sekunder. Var noga med att använda två testpinnar på vardera kind på hunden. Det är lösa hudceller som ska samlas in, **inte** saliv.
4. **Lägg ner provpinnarna i testkuvertet** och klistra igen. (Du ska ej lägga provpinnarna i de blå/vita originalemballagen, dessa ska kastas).
5. **Upprepa steg 1–3** för samtliga hundar som ska testas.
6. **Lägg ner alla testkuvert samt provtagningsformuläret** i svarskuvertet och posta till oss.



Nästa steg.

Du kommer få ditt resultat som en PDF-fil skickad till den e-post som angavs vid beställningstillfället. Analystid för de olika DNA-testerna hittar ni på vår hemsida under respektive DNA-test.

Vid frågor besök vår hemsida www.mydnavevet.se eller kontakta oss på info@mydnavevet.se eller 040-69 22 450